



## гель МЕДИЧНИЙ ВИРІБ

### СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЖІНОК І ДІТЕЙ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ДОПОМІЖНОГО ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙ ЗОВНІШНІХ ІНТИМНИХ ЗОН

#### ОПИС ПРОДУКТУ

prOVag gel® — спеціалізований медичний засіб, призначений для підтримки лікування бактеріальних і грибкових інфекцій зовнішніх статевих органів.

Компоненти prOVag gel® підтримують фізіологічний кислий рН і таким чином захищають мікробіологічний баланс інтимних зон. prOVag gel® діє протигрибово, обмежуючи ріст *Candida albicans*, *Candida glabrata*, а також антибактеріально проти мікроорганізмів, які найчастіше викликають вагініт, таких як: *Gardnerella vaginalis*, *Escherichia coli*, *Prevotella bivia*, *Streptococcus agalactiae*.

prOVag gel® рекомендований жінкам і дітям старше 1 року, які схильні до інфекцій в інтимній зоні, для підтримки лікування та полегшення наслідків інфекцій. prOVag gel® зменшує відчуття печіння та дискомфорту, заспокоює подразнення та інші симптоми, пов'язані із запаленням інтимних зон, доглядає та зволожує.

Також рекомендується використовувати prOVag gel® для щоденної профілактики бактеріальних і грибкових інфекцій.

Гіпоалергенний препарат, рекомендований людям з чутливою шкірою, схильною до алергії, atopії, пересихання і подразнення в області зовнішніх статевих органів.

*Продукт пройшов дерматологічне тестування на пацієнтах з позитивною історією алергії.*

*Продукт пройшов гінекологічне тестування.*

*Виготовлено в умовах належної Good Manufacturing Practice.*

Для отримання більш сильного та тривалого ефекту рекомендується застосовувати prOVag gel® одночасно з дієтичним харчуванням спеціального медичного призначення prOVag® у формі капсул для перорального прийому.

Більше інформації про інтимне здоров'я на [www.provag.pl](http://www.provag.pl)

**prOVag gel® має позитивний висновок Польського гінекологічного товариства.**

#### СКЛАД

Інгредієнти prOVag gel® - це метаболіти молочнокислих бактерій роду *Lactobacillus*, головним чином молочна кислота та інші органічні кислоти, які, зберігаючи низький рН, природним чином захищають інтимну зону від несприятливих мікроорганізмів. PrOVag gel® також містить воду та допоміжні речовини: пропіленгліколь, гліцерин, гідроксипропілметилцелюлоза, фенілетилловий спирт, каприловий гліколь, ароматизатор.

*prOVag gel® не містить ПЕГ, парабенів, миючих засобів, у тому числі: SLS, SLES.*

#### КОЛИ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ PROVAG GEL®?

prOVag gel® рекомендований жінкам і дітям, схильним до сухості зовнішніх статевих органів, порушення природної мікрофлори і рецидивуючих запалень.

prOVag gel® можна використовувати щодня або періодично, для:

- підтримки лікування бактеріальних і грибкових інфекцій інтимних зон
- підтримання балансу мікрофлори інтимних зон
- полегшення симптомів бактеріальної або грибової інфекції, таких як печіння, свербіж і дискомфорт зовнішніх статевих органів
- підтримання фізіологічного кислого рН інтимних зон, що перешкоджає надмірному росту бактерій і грибків

і профілактично в умовах підвищеного ризику запалення в інтимній зоні, особливо:

- під час і після лікування антибіотиками (пероральними або вагінальними)
- у ситуаціях ускладненої гігієни, наприклад, під час подорожі
- при частому відвідуванні басейну, джакузі, сауни
- після депіляції інтимних зон
- в клімактеричному, післяпологовому періоді, при цукровому діабеті.

## ДОЗУВАННЯ

---

Зазвичай достатньо одного нанесення гелю один раз на добу. При необхідності prOVag gel® можна застосовувати 2-3 рази на день.

## СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

---

Після миття інтимної зони нанесіть тонкий шар prOVag gel® на промежину та зовнішні статеві органи. prOVag gel® слід наносити спереду в напрямку ануса.

prOVag gel® зручний у використанні, не забруднює білизну, а спеціальна консистенція забезпечує приємне та тривале зволоження.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

---

Не використовувати при підвищеній чутливості до будь-якого з інгредієнтів продукту, У разі гострих вагінальних інфекцій рекомендується застосування під контролем лікаря. У зв'язку з відсутністю відповідних досліджень під час вагітності та годування груддю слід застосовувати препарат після консультації з лікарем.

Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.

Не ковтати.

Препарат зберігати в недоступному для дітей місці.

Після нанесення препарату може виникнути тимчасове легке пощипування, що пов'язано з правильною реакцією на зниження рН.

При появі будь-яких тривожних симптомів після застосування prOVag gel®, таких як посилення свербіжу, посилення печіння, висипання тощо, слід припинити використання препарату та звернутися до лікаря.

## СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ

---

Зберігати при температурі від 15 °C до 25 °C у сухому місці.

## УПАКОВКА

---

Ємкість 30 г типу Airless в картонній коробці з інструкцією із застосування.

## ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ВИРОБУ

---

3 роки



Акціонерне товариство Інститут біотехнології сироваток і вакцин BIOMED

Ал. Соснова 8, 30-224 Краків,

Тел. + 48 12 37 69 200

Факс: 48 12 37 69 205

e-mail: [informacjanaukowa@biomed.pl](mailto:informacjanaukowa@biomed.pl)

[www.biomed.pl](http://www.biomed.pl)

## ДАТА РОЗРОБКИ ОНОВЛЕННЯ

2013-09 / 2018-03



Виробник



Вжити до



Номер серії



Див. в інструкції з використання



Нестерильний



Обмеження допустимої температури